


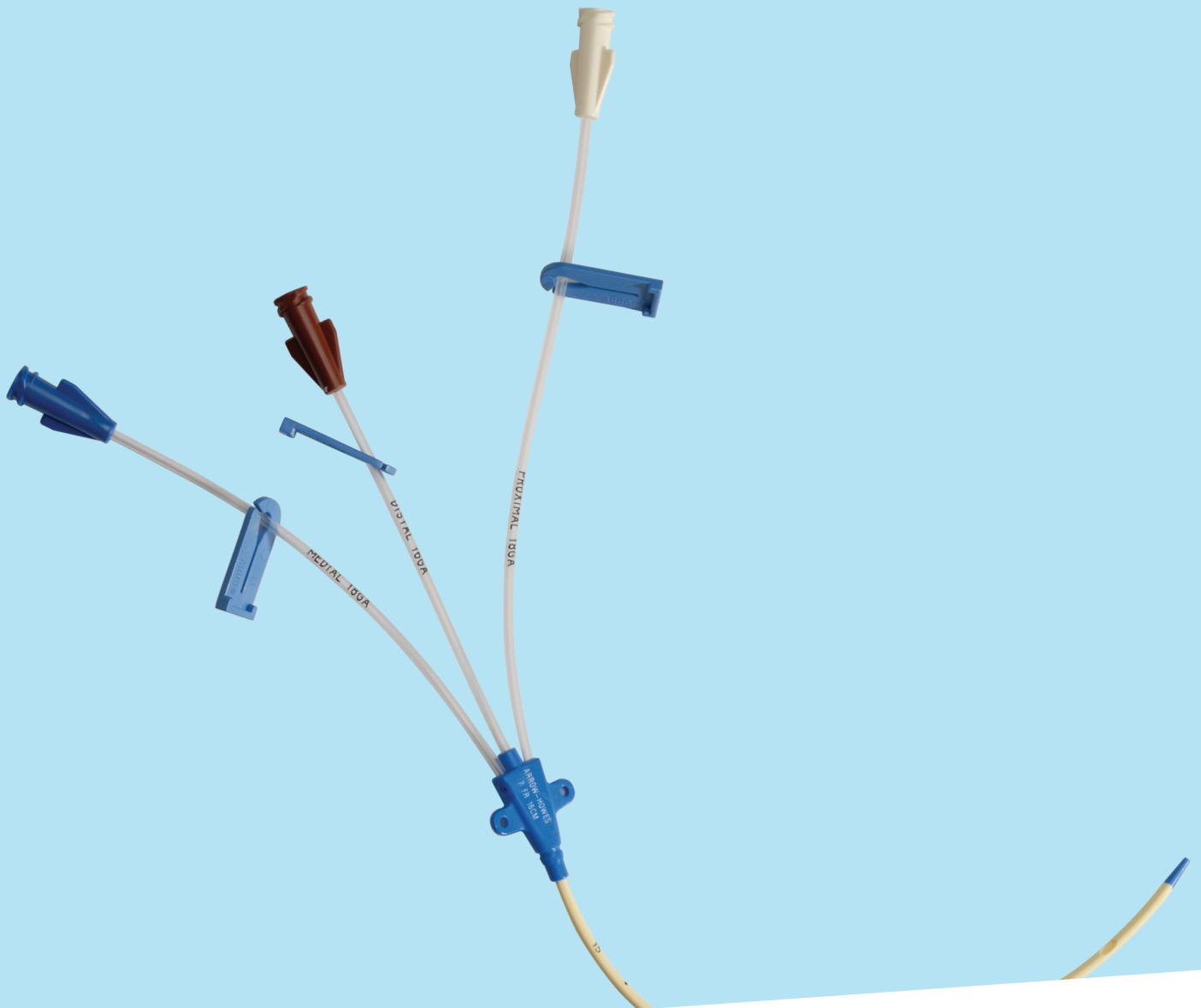

ARROW CVC Systems

アロー中心静脈カテーテルシリーズ


CENTRAL ACCESS

Arrow CVC Systems

テレフレックスは、豊富な種類、サイズのアローブランドの中心静脈カテーテルを提供しています。アロー中心静脈カテーテルセットは、多様なルーメン構成、長さ、フレンチサイズ、ゲージサイズを取り揃えています。アローは、継続的な製品の開発と最適化により、お客様と患者様が信頼のおけるパートナーとなっています。

ブルーフレックスチップ

カテーテルの先端は柔らかく、挿入と留置のパフォーマンスを両立させます。

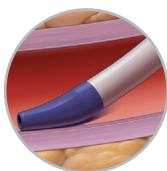


フレキシブルポリウレタン

生体内で軟化することで、安全に留置できるよう設計されています。

ジャンクションハブ

患者様にとっての快適さ、カテーテル管理の容易さに配慮して設計されています。

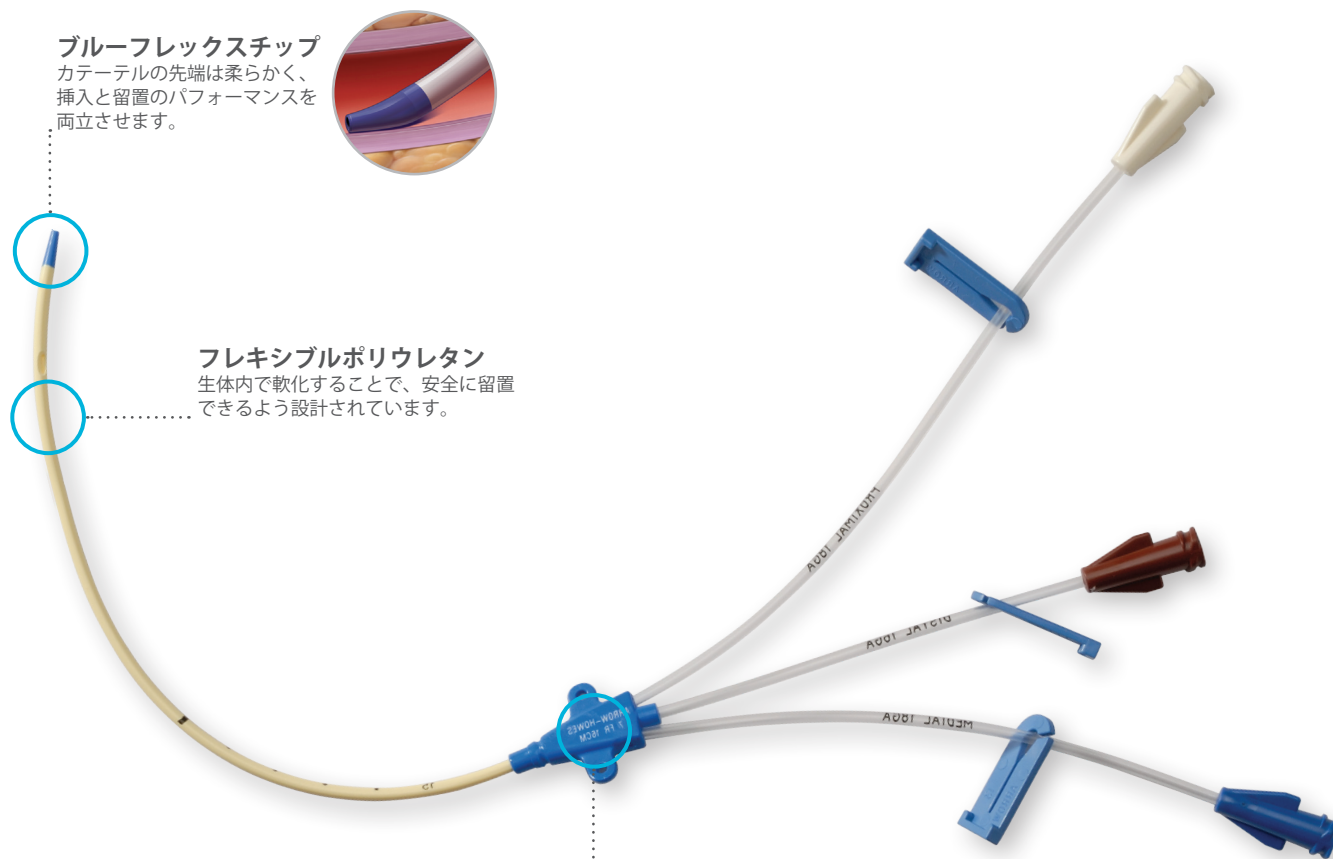



テレフレックスは、穿刺時の保護に対して**ソリューション**を提供します。

シャープスアウェイカップ


使用済み針を簡単かつ安全に移動させることができます。小さな赤いカップが、針を固定し保護します。針ベベルを安全に保護しているので、ご施設内の医療廃棄ボックスに入れて最終処分ができます。

セーフティーシリンジ


このシリンジの押子は、特許取得済みの特殊な弁を内蔵しており、押子を通して直接ガイドワイヤを血管内腔に挿入することができます。

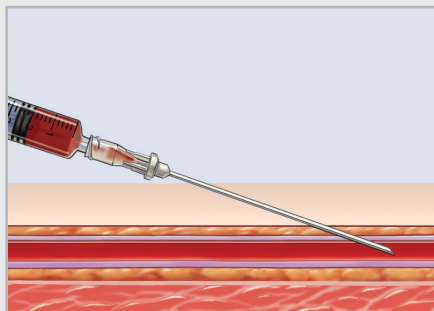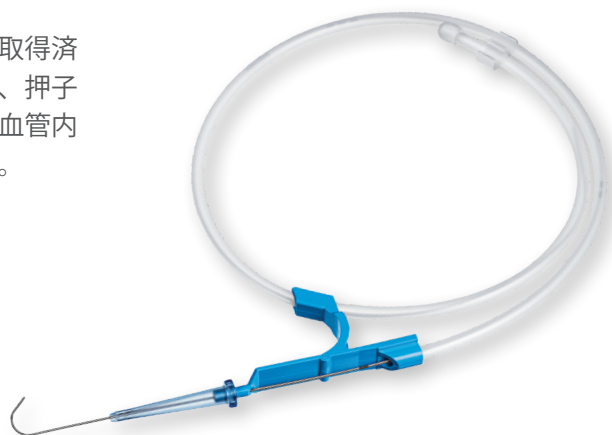

局所麻酔薬を投与後、セーフティーシリンジに接続した穿刺針で静脈に穿刺します。

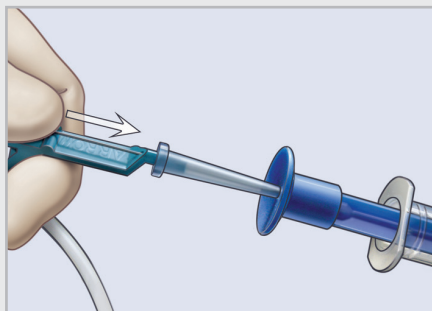

J字型部分をまっすぐに伸ばした状態のガイドワイヤをアドバンサー先端に合わせ、アドバンサー先端をセーフティーシリンジの押子後部の穴に挿入します。

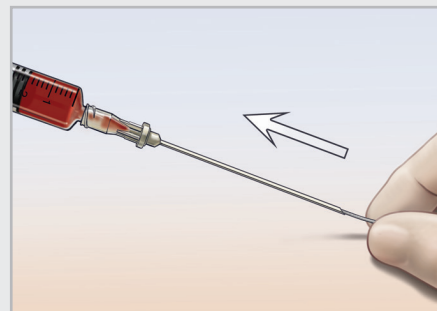


ガイドワイヤ先端を任意の位置まで進め、ガイドワイヤを保持しながらセーフティーシリンジと穿刺針を一緒に抜去します。

警告：ガイドワイヤの切断や損傷を防止するため、ガイドワイヤを切断して長さを変えたり、針ベベルに逆らって抜去したりしないでください。血管損傷の原因となる可能性があるため、ガイドワイヤの近位を血管に挿入しないでください。

注意事項：ガイドワイヤを常にしっかり保持するようにしてください。

アロー 中心静脈カテーテル セット

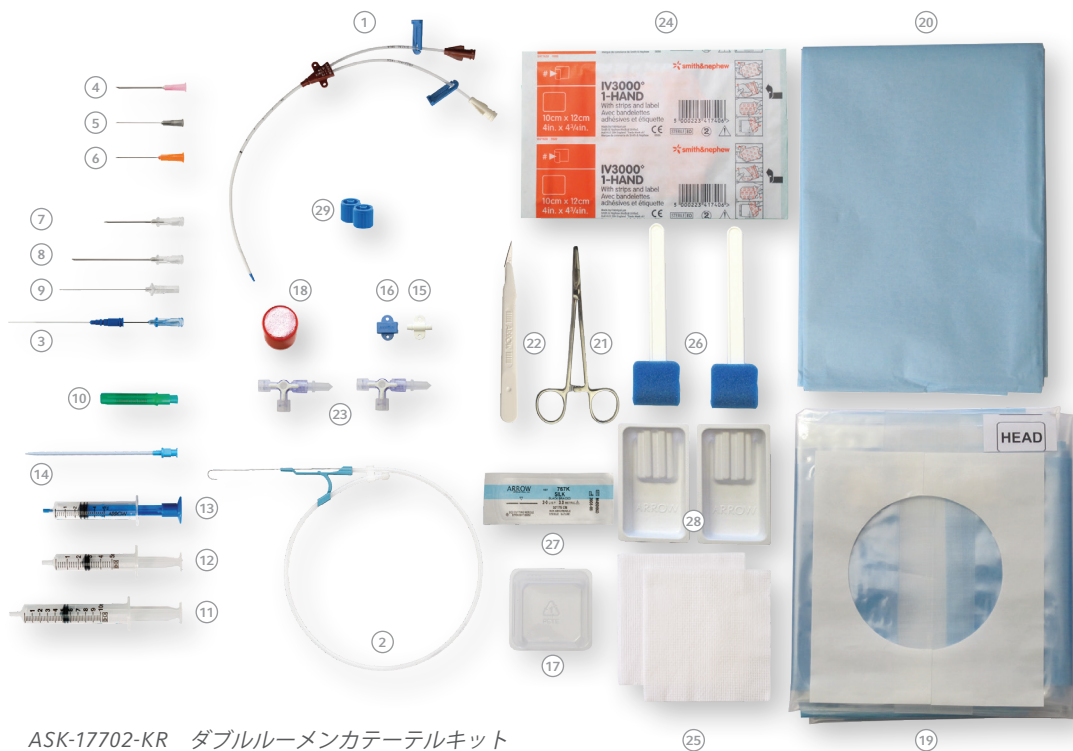

ASK-17702-KR ダブルルーメンカテーテルキット

キット内容物

- | キット内容物 | | | |
|--------|---|----|--------------------------------|
| 1 | カテーテル | 6 | 注射針 25 Ga.
(0.5mm) × 3.81cm |
| 2 | ガイドワイヤ | 7 | 穿刺針 18 Ga.
(1.2mm) × 3.81cm |
| 3 | カニユーラ 18 G
(1.4mm) × 6.35cm
針カニユーラ針
20 Ga. (0.9mm) | 8 | 穿刺針 18 Ga.
(1.2mm) × 6.35cm |
| 4 | 注射針 18 Ga.
(1.2mm) × 3.81cm | 9 | 穿刺針 22 Ga.
(0.7mm) × 6.98cm |
| 5 | 注射針 22 Ga.
(0.7mm) × 3.81cm | 10 | 圧測定用プローブ |
| | | 11 | ルアースリップシリ
ンジ (10mL) |
| | | 12 | ルアースリップシリ
ンジ (5mL) |
| | | 13 | セーフティーシリ
ンジ (5mL) |
| | | 14 | ダイレータ |
| | | 15 | カテーテルクランプ |
| | | 16 | カテーテルブルー
クランプ |
| | | 17 | 薬液カップ |
| | | 18 | シャープスアウェイ
カップ |
| | | 19 | KRドレープ |
| | | 20 | 穴なしドレープ |
| | | 21 | 持針器 |
| | | 22 | メス |
| | | 23 | 活栓 |
| | | 24 | ドレッシング
(IV 3000-1Hand) |
| | | 25 | ガーゼ |
| | | 26 | スポンジスワブ |
| | | 27 | 針付縫合糸 (曲針)
3-0曲針付きシルク |
| | | 28 | スワブ用トレイ |
| | | 29 | ダストキャップ |
| | | | *CSRラップも付いてい
ます。 |

アローシンググルルーメンカテーターセット

製品番号	カテテル				ガイドワイヤ		フルキッ トタイプ	セーフティーシ リンジ	セッ ト数 箱
	ルーメン	カテテルサイズ	外径 (mm)	長さ (cm)	長さ (cm)	Ø mm (inch)			
ASK-04301-KR	1	16 G	1.8	20	60	0.81 (0.032")	・	・	5
AK-04150-E-S	1	20 G	1.2	12	35	0.64 (0.025")	・		5
AK-04301-J	1	16 G	1.8	20	60	0.81 (0.032")	・	・	10
ES-04218	1	18 G	1.5	20	45	0.64 (0.025")			10
CS-04306-EJ	1	16 G	1.8	16	45	0.81 (0.032")		・	10
CS-04301-EJ	1	16 G	1.8	20	60	0.81 (0.032")		・	10
CS-04400	1	16 G	1.8	30	60	0.81 (0.032")			10
AJ-01671	1	16 G	1.8	70	100	0.89 (0.035")		・	5
ASK-01651-TRC	1	16 G	1.8	50	100	0.89 (0.035")	・	・	5

アロー 中心静脈カテーテル セット

アローマルチルーメンカテーテルセット

製品番号	カテーテル				ガイドワイヤ		フルキット タイプ	セーフティージ リング	セッ ト数/ 箱
	ルーメン	カテーテルサイズ	外径 (mm)	長さ (cm)	長さ (cm)	Ø mm (inch)			

アローダブルルーメンカテーテルセット

AK-12702-J	2	7 Fr	2.5	16	45	0.64 (0.025")	•	•	5
AK-15802-J	2	8 Fr	2.8	20	60	0.81 (0.032")	•	•	5
ASK-17702-KR	2	7 Fr	2.5	20	60	0.81 (0.032")	•	•	5
ASK-14702-KR	2	7 Fr	2.5	30	68	0.81 (0.032")	•	•	5
ASK-17752-KR	2	7 Fr	2.5	60	100	0.89 (0.035")	•	•	5
CS-12702-E	2	7 Fr	2.5	16	45	0.64 (0.025")		•	5
CS-14402	2	4 Fr	1.5	13	45	0.46 (0.018")			5
CS-14502	2	5 Fr	1.8	13	45	0.53 (0.021")			5
CS-15402-E	2	4 Fr	1.5	8	45	0.46 (0.018")			5
CS-16402	2	4 Fr	1.5	30	68	0.46 (0.018")			5
JP-14702-C	2	7 Fr	2.5	30	68	0.81 (0.032")		•	5
JP-17702-C	2	7 Fr	2.5	20	60	0.81 (0.032")		•	5
JP-17752-C	2	7 Fr	2.5	60	100	0.89 (0.035")		•	5

アロートリプルルーメンカテーテルセット

ASK-15703-KR	3	7 Fr	2.5	20	60	0.81 (0.032")	•	•	5
ASK-14703-KR	3	7 Fr	2.5	30	68	0.81 (0.032")	•	•	5
ASK-18763-KR	3	7 Fr	2.5	60	100	0.89 (0.035")	•	•	5
AK-17753-J	3	7 Fr	2.5	60	100	0.89 (0.035")	•	•	5
CS-15403	3	4 Fr	1.5	8	45	0.46 (0.018")			5
CS-14403	3	4 Fr	1.5	13	45	0.46 (0.018")			5
CS-15853-E	3	8.5 Fr	3.0	20	60	0.81 (0.032")		•	5
CS-12553-J	3	5.5 Fr	1.9	5	45	0.46 (0.018")			5
CS-15553-E	3	5.5 Fr	1.9	8	45	0.46 (0.018")			5
CS-16553-E	3	5.5 Fr	1.9	13	45	0.46 (0.018")			5
CS-16553-J	3	5.5 Fr	1.9	13	45	0.46 (0.018")			5
CS-14553	3	5.5 Fr	1.9	30	68	0.46 (0.018")			5
JP-12703-C	3	7 Fr	2.5	16	45	0.81 (0.032")		•	5
JP-14703-C	3	7 Fr	2.5	30	68	0.81 (0.032")		•	5
JP-18763-C	3	7 Fr	2.5	60	100	0.89 (0.035")		•	5
NC-14403-J	3	4 Fr	2.5	8	45	0.46 (0.018")			5
JP-15703-C	3	7 Fr	2.5	20	60	0.81 (0.032")		•	5

アロークワッドルーメンカテーテルセット

ASK-14854-KR	4	8.5 Fr	3.0	30	68	0.81 (0.032")	•	•	5
ASK-15854-KR	4	8.5 Fr	3.0	20	60	0.81 (0.032")	•	•	5
CS-15854-E	4	8.5 Fr	3.0	20	60	0.81 (0.032")		•	5
CS-14854-E	4	8.5 Fr	2.9	30	68	0.81 (0.032")		•	5

医療機器承認番号：20200BZY00019000
販売名：アロー 中心静脈カテーテル セット
JMDNコード：16615110
クラス分類：IV（高度管理医療機器）

特定保健医療材料名：【シングルルーメン】
021 中心静脈用カテーテル（1）中心静脈カテーテル
①標準型 ア シングルルーメン
：【ダブルルーメン・トリプルルーメン・クワッドルーメン】
021 中心静脈用カテーテル（1）中心静脈カテーテル
①標準型 イ マルチルーメン

テレフレックスは、医療技術の提供を通して人々の健康と生活の質の向上を目指すグローバル企業です。当社は、患者様と医療機関のお役に立てるよう、満たされていない臨床ニーズを絶え間なく追求するという使命のもと、イノベーションを続けています。当社の製品ラインは血管アクセスやインターベンションアクセス、外科手術、麻酔、心疾患治療、泌尿器治療、救急医療、呼吸管理ケアの分野のソリューションを網羅しています。世界中で働くテレフレックスの社員は、自身の日々の業務が世界に変化をもたらすという理解の下、一致団結しています。詳細は、teleflex.com をご覧ください。

テレフレックスは、Arrow、Deknatel、LMA、Pilling、Rüsch、QuikClot、UroLiftおよびWeckといった共通の目的で結ばれている信頼できるブランドを展開しています。

Corporate Office

電話：+1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Regional Offices

日本：

製造販売業者：テレフレックスメディカルジャパン株式会社

所在地：〒163-0805 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル

カスタマーサービス：0570-055-160, E-mail: infojapan@teleflex.com, www.teleflex.com

米国： 電話 +1 919 544 8000, Toll Free 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

ラテンアメリカ： 電話：+1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, 米国

International: 電話：+353 (0) 9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Ireland

オーストラリア 1300 360 226

オーストリア +43 (0)1 402 47 72

ベルギー +32 (0)2 333 24 60

カナダ +1 (0)800 387 9699

中国（上海） +86 (0)21 6060 7000

中国（北京） +86 (0)10 6418 5699

チェコ共和国 +420 (0)495 759 111

フランス +33 (0)5 62 18 79 40

ドイツ +49 (0)7151 691 3004

ギリシャ +30 210 67 77 717

インド +91 (0)80 4093 4790

イタリア +39 0362 58911

日本 +81 (0)3 6632 3600

韓国 +82 2 536 7550

メキシコ +52 55 5002 3500

オランダ +31 (0)88 00 215 00

ニュージーランド 0800 601 100

ポーランド +48 22 4624032

ポルトガル +351 225 491 051

シンガポール (SEA非直販国) +65 6439 3000

スロバキア共和国 +421 (0)3377 254 28

南アフリカ +27 (0)11 807 4887

スペイン +34 91 198 84 31

スイス +41 (0)31 818 40 90

英国 +44 (0)1494 53 27 61

詳細は、teleflex.com をご覧ください。

テレフレックス、テレフレックスのロゴ、Arrow、Blue FlexTip、SharpsAway、SharpsAway IIは、米国および（または）その他の国々におけるテレフレックス社またはその関連会社の商標または登録商標です。

本資料の情報は、製品の取扱説明書に代わるものではありません。一部の製品は特定の国において利用できない場合があります。お住まいの地域の代理店にお問い合わせください。

© 2023 Teleflex Incorporated.無断複写・転載を禁じます。

MCI-101537-EN-JP・REV 0・11 23 PDF TMJ-2472