



# CVC システム - SA シリーズ ARROW CVC キット



テレフレックスのARROWブランド中心静脈カテーテルセットSAシリーズは新時代を拓きます。

### 特徴

テレフレックスのアロー中心静脈 カテーテルセット SAシリーズ:

- 人間工学に基づいたトレイデ ザイン
- CDCガイドラインで推奨される大型ドレープのサイズは日本人の体型調査データに基づき決定

以下の構成品を含んでいます。 新型ダイレータ、 セーフティシリンジ、 シャープアウェイ、 シャープスアウェイII、 はさみ、透明薬液カップ3個、 識別用ラベル



アロー SA シリーズ CVC キットは、人間 工学に基づくトレイデザインを特徴とし、 患者様の適切な治療に、必要なものがすぐ に手に取れるようにデザインされています。 操作性を追求したキットデザインにより、 限られたスペースや人員でも処置準備が できます。必要不可欠な構成品を揃えて います:

**人間工学に基づいたトレイデザイン** 一 構成品の配置は操作性を追求した設計です。


大型の穴あきドレープ CDCガイドライン に基づき設計されています。

サイズ(122 × 224 cm) は、日本人の身体のサイズに合わせられており、患者様の視界を妨げないよう、目を覆う部分は透明になっています。

新型ダイレータ — 先端のテーパー設計により、スムースな挿入を可能にし、血管損傷のリスクを軽減しています。内径とガイドワイヤのサイズの最適化により、ダイレータ先端およびガイドワイヤの損傷リスクも減少します。柔軟な素材のガイドワイヤグリップは、快適な握りと操作性を実現します。

**セーフティシリンジ** — シリンジの押子から血管内に直接ガイドワイヤを挿入することが出来ます。押子には特殊な弁が内蔵されており、ガイドワイヤ挿入時、血管内に空気が流入するリスクを軽減します。

新規に追加された構成品 ― シャープス アウェイカップ、はさみ、透明薬液カップ3個、 識別用ラベルが付属されています。

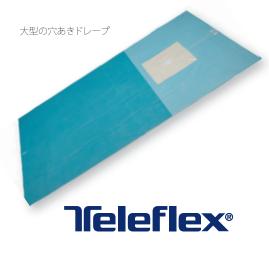

医療機器承認番号 販売名


: 20200BZY00019000 : アロー 中心静脈カテーテル セット

JMDNコード クラス分類

16615110 Ⅳ(高度管理医療機器) 特定保健医療材料名:

中心静脈用カテーテル 標準型マルチルーメン セルジンガー型

# オーダー情報

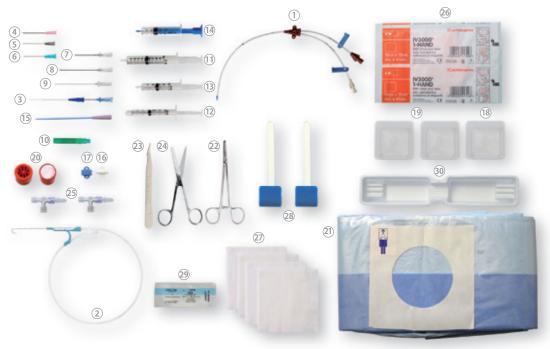

SA シリーズ ダブルルーメンカテーテルキット

アローダブルルーメンカテーテル	Al	RROW

	カテーテル				ガイドワイヤ		
製品番号	ルーメン	カテーテル サイズ(Fr.)	外径 (mm)	長さ (cm)	長さ (cm)	Ø mm (inch)	セット /ボックス
SA-12702-J	2	7	2.4	16	45	0.81 (0.032")	5
SA-17702-J	2	7	2.4	20	68	0.81 (0.032")	5
SA-14702-J	2	7	2.4	30	68	0.81 (0.032")	5
SA-17752-J	2	7	2.4	60	100	0.89 (0.035")	5

#### アロートリプルルーメンカテーテル **ARROW**

	カテーテル				ガイドワイヤ		
製品番号	ルーメン	カテーテル サイズ(Fr.)	外径 (mm)	長さ (cm)	長さ (cm)	Ø mm (inch)	セット /ボックス
SA-12703-J	3	7	2.4	16	45	0.81 (0.032")	5
SA-15703-J	3	7	2.4	20	68	0.81 (0.032")	5
SA-14703-J	3	7	2.4	30	68	0.81 (0.032")	5
SA-18763-J	3	7	2.4	60	100	0.89 (0.035")	5

### 製造販売元

### テレフレックスメディカルジャパン株式会社

本社 〒163-0805 東京都新宿区西新宿 2-4-1 新宿 NS ビル 5F カスタマーサービス TEL: 0570-055-160 E-mail: infojapan@teleflex.com

## キット内容物:

- ① カテーテル
- ② ガイドワイヤ
- ③ カニューラ 18Ga.(1.4mm)×6.35cm カニューラ針 20Ga.(0.9mm)
- ④ 注射針 18Ga.(1.2mm)×3.81cm
- ⑤ 注射針 22Ga.(0.7mm)×3.81cm
- ⑥ 注射針 25Ga.(0.5mm)×3.81cm
- ⑦ 穿刺針 18Ga.(1.2mm)×3.81cm
- ⑧ 穿刺針 18Ga.(1.2mm)×6.35cm
- 9 穿刺針 22Ga.(0.7mm)×6.98cm
- 10 圧測定用プローブ
- (1) ルアースリップシリンジ(10mL)
- (12) ルアーロックシリンジ(3mL)
- ③ ルアースリップシリンジ(5mL)
- (14) セーフティシリンジ(5mL)
- 15 ダイレータ
- (16) カテーテルクランプ
- ① カテーテルブルークランプ
- (18) 薬液カップ(100mL)
- 19 薬液カップ(60mL)
- 20 シャープスアウェイ川・ シャープスアウェイカップ
- ②1) 穴あきドレープ
- 22 持針器
- 23 メス
- 24 はさみ
- 25 活栓
- 26 ドレッシング(IV3000・1Hand) commerce de Smith&Nephew社製です。
- ② ガーゼ
- 28 スポンジスワイプ
- 29 針付縫合糸(曲針)
- 30 スワブ用トレイ ※CSRラップ、薬液カップ識別用 ラベルも付いてます。

